

EPIGLU® – Kleben statt nähen! ANWENDUNGS- UND LAGERHINWEISE

EPIGLU® ist schnell und einfach auf die adaptierten Wundränder aufzubringen, härtet schnell aus und sichert auch Wundränder, die unter Spannung stehen.

EPIGLU® wird in 3 Packungsgrößen angeboten:

Kleinpackung mit 1 Tube zu 3 g

Doppelpackung mit 2 Tuben à 3 g

Sparpackung mit 4 Tuben à 3 g

Jeder Packung liegen entsprechend der Packungsgröße Feindosierpipetten und Paletten bei.



Anwendungshinweise:

Direkt aus der Tube wird die benötigte Menge Kleber in die Paletten geträufelt ...


... mit den Feindosierpipetten aufgesogen und auf die adaptierten Wundränder aufgebracht oder ...

... die Feindosierpipetten werden abgeschnitten, auf den Tropfer der Tube gesteckt und der Kleber direkt aus der Tube auf die Wunde aufgebracht. Diese Methode ist besonders einfach und materialsparend.

Die Feindosierpipetten werden immer nur für einen Patienten benutzt und anschließend entsorgt.

Lagerhinweise:

Die angebrochene Tube senkrecht in die dafür vorgesehene Aussparung in der Packung stecken und kühl lagern. Am besten ist die Lagerung in der Tiefkühlung, aus der EPIGLU®, das nicht zu einem Block gefriert, entnommen und sofort eingesetzt werden kann. Bei Tiefkühlagerung ist das Material 3 Jahre lagerstabil.

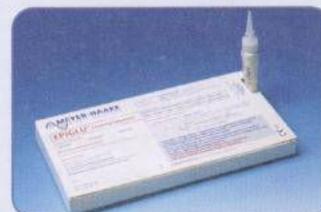

Aufgrund der langen Lagerstabilität ist EPIGLU® auch für Praxen geeignet, in denen Wundkleber selten eingesetzt werden.

EPIGLU® – der einzige Ethyl-2-Cyanoacrylatkleber in Tuben mit entscheidenden Vorteilen!



Christine Meyer-Haake
Am Joseph 9
61273 Wehrheim
Deutschland/Germany

Telefon/Phone ☎: +49 (0) 60 81-44 61-0
Telefax/Telefax ☎: +49 (0) 60 81-44 61-22
E-Mail: info@meyer-haake.com / export@meyer-haake.com
Internet: http://www.meyer-haake.com